

日本の医療介護の現場に貢献する

ハーベストクラフト株式会社は
「医療・介護現場のあったらいいな」を考える会社です。



<https://www.harvestcraft.co.jp>



「医療・介護現場のあったらいいな」を考える
ハーベストクラフト株式会社
〒195-0072 東京都町田市金井 6-1-6

装着が
簡単・軽量・蒸れにくい!




【グリップ部(6ヶ所)】

介助が必要な方が
握れるポイント。
全部で6ヶ所あり、
様々なシーンで
使うことができます。

【本体】

介助者が装着します。
背中側に持ち手がくる様に
装着します。

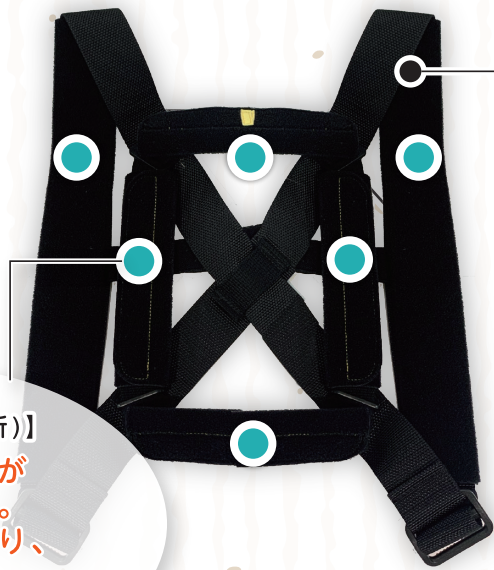

【仕様】サイズ:フリーサイズ / 素材:ナイロン、ポリウレタン

介助者装着型 移乗・移動補助サポーター

持ち手つきタスキ

ココもって!

本製品は介助者が装着し、介護が必要な方の
移乗や移動をサポートすることを目的とした補助具です。




使用方法の
動画はこちら!



【ストッパー】

体前面で本体を固定します。

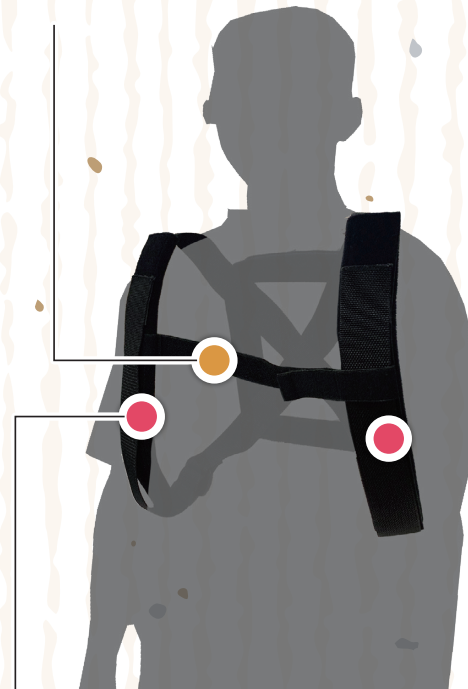

装着イメージ

【面ファスナー】(2ヶ所)

肩回りの長さを調整する部分です。

肩まわり部分に2ヶ所配置されています。

移乗補助

少ない力で移乗を安全にサポート



移動補助

身軽に移動を安全にサポート



使用方法

- ① 介助者(●)がサポーターを装着し介助される方(●)に持ち手の場所を見せます。
- ② 介助される方(●)に持ち手を握ってもらいます。
6ヶ所あるので持ちやすい持ち手を握ってもらってください。
- ③ 介助される方(●)が握ったことを確認し、介助者(●)が移乗や移動を開始してください。
- ④ 移乗や移動が終了したら介助される方(●)に持ち手から手を放してもらってください。

※介助される方の健康状態(筋力、麻痺の状態、握力の強さ等)で最適な持ち方が異なります。有識者と相談の上、ご利用ください。

※意図せず、介助される方の手が、外れる場合があります。

転倒などには、充分にご注意ください。

※ ●、● は右のイラストの人物の服の色を表しています。

装着方法(介助者への装着)

- (1) 介助者が、本体を装着します。
- (2) リュックの要領で、持ち手を背中側に装着します。
黄色いしるしがついている方向が上方向です。
- (3) 面ファスナー部分で肩周りの長さを調整します。
- (4) ストッパーで本体を体に固定します。
- (5) しっかり装着できていることを確認します。

※使用後は、装着方法と逆の手順で取り外します。

※厚手の上着の上からの装着は、避けてください。脱げやすくなります。

洗浄方法

- ・水、ぬるま湯(30度以下)による手洗いが可能です。
- ・グリップ部分、ストッパー部分は取り外して洗うことができます。
- ・洗浄後は陰干しし、十分に乾燥させてからご使用ください。
- ・亀裂、ほつれが見つかった際は、販売店にご相談ください。

保管方法

車の中など高温になる場所におかないでください。



使用上の注意

- ・本取り扱い説明書に記載の使用目的以外の目的では使用しないでください。
- ・本体に亀裂、ほつれ等がないことを確認のうえ、ご使用ください。
- ・ご使用に不安のある方や、健康状態(筋力、麻痺の状態、握力の強さ等)に不安のある方は有識者の指導を受けて使用してください。
- ・使用時に痛みや痺れ、違和感を感じる場合は無理をせず、使用を中止してください。
- ・手や腕に傷、腫れ、湿疹などがある場合は使用しないでください。
- ・介助者は、長期間使用しないでください。
- ・本品は医療機器ではありません。
- ・本品は改造しないでください。
- ・感染予防の観点から、洗浄せずに使い回すことは推奨しません。

持ち手つきタスキ

ココもって!



開発元: ハーベストクラフト株式会社
東京都町田市金井 6-1-6



販売・お問い合わせ先: リプト株式会社

東京都八王子市明神町 4丁目 9番 1号

電話番号: 042-649-3491

URL: <https://livet.jp>