

日本の医療介護の現場に貢献する

ハーベストクラフト株式会社は  
「医療・介護現場のあったらいいな」を考える会社です。



<https://www.harvestcraft.co.jp>



「医療・介護現場のあったらいいな」を考える  
ハーベストクラフト株式会社  
〒195-0072 東京都町田市金井 6-1-6


介護される側からの発想で生まれた



持ち手つきサポーター

# ヨイシヨっと!

本製品はご自身によるトレーニング、動作の補助および  
介護者の介護補助を目的としたサポーターです。

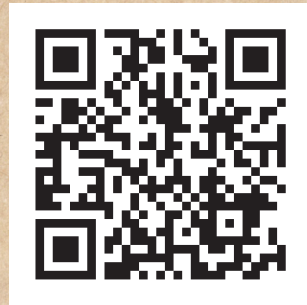

使用方法の  
動画はこちら!



装着の簡便性!  
自由度アップ

【本体】  
足に装着する部分です。

【グリップ部】  
手で把持する部分です。



【装着部 面ファスナー】  
着脱可能な面ファスナー部分です。

ベッド介助・車椅子移動  
重い脚を容易にサポート



自主リハビリサポート  
自力で様々な筋肉を鍛える



トイレ介助・排泄エイド  
要介護者の意図を活かす



点对称デザイン

重い脚を容易に掴め介護負担を軽減  
自立生活への身体機能を維持し健康寿命を伸ばす


【仕様】 サイズ：フリーサイズ / 素材：ナイロン、ポリウレタン

【付属ベルト】(ベルトありタイプ)  
本体と手で把持する部分の調節を行います。



## 装着方法

- ① 装着したい場所（イラスト例は太もも）にサポーター本体をあてます。
- ② サポーター本体が交差するように巻き付けてください。
- ③ グリップ部を軽く引っ張って、面ファスナーを持ち手付近でしっかり固定してください。

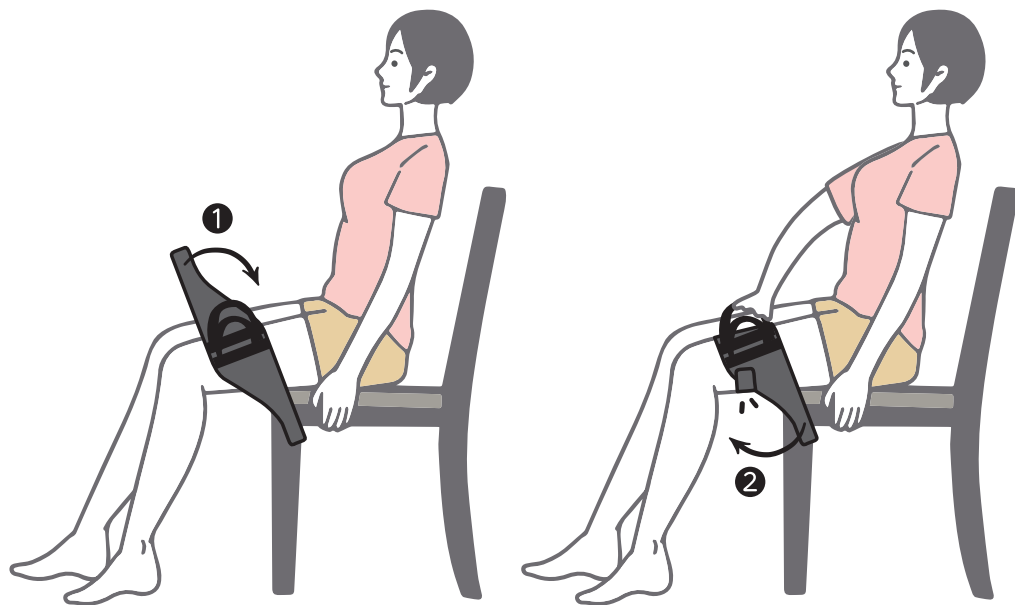

※付属ベルト（ベルトありタイプ）を使用する場合、太ももの裏側に持ち手が来て付属ベルトを太もも前面に回し装着すると、サポーター前面が太ももの裏側を全体的に包み込むことで安定感が増します。付属ベルトの長さを調整することができます。



## 使用方法

### [ 動作補助 ]

使用者が持ち手（付属ベルト）をつかみ、動かしたい方向へその部位を移動させてください。

### [ 介護補助 ]

介護者が持ち手（付属ベルト）をつかみ、動かしたい方向へその部位を移動させてください。

### [ トレーニング ]

理学療法士などの有識者の指導のもとで、使用者が持ち手（付属ベルト）をつかみトレーニングをおこなってください。

## 洗浄方法

- ・水、ぬるま湯（30度以下）による手洗いが可能です。
- ・洗浄後は陰干しし、十分に乾燥させてからご使用ください。
- ・亀裂、ほつれが見つかった際は、販売店にご相談ください。

## 保管方法

車の中など高温になる場所におかないでください。

## 使用上の注意

- ・本取り扱い説明書に記載の使用目的以外の目的では使用しないでください。
- ・不安のある方や膝や足に疾患のある方は有識者の指導を受けて使用してください。
- ・本体に亀裂、ほつれ等がないことを確認のうえ、ご使用ください。
- ・装着及び使用時に痛みや痺れ、違和感を感じる場合は無理をせず、使用を中止してください。
- ・装着部に傷、腫れ、湿疹などがある場合は使用しないでください。
- ・本品は医療機器ではありません。
- ・本品は改造しないでください。
- ・感染予防の観点から、洗浄せずに使い回すことは推奨しません。

持ち手つきサポーター

# ヨイショっ!



開発元：ハーベстокラフト株式会社  
東京都町田市金井 6-1-6

販売・お問い合わせ先：リプト株式会社  
東京都八王子市明神町 4丁目 9番 1号

電話番号：042-649-3491

URL：<https://livet.jp>

